

Schwammtücher fungizidfrei

Éponges sans fongicide

Spugna senza fungicida

Sponge fungicide-free

Esponja sin fungicidas

5 Stück für FAM Dispenser

5 pièces pour Diffuseur FAM

5 pezzi per il Diffusore FAM

5 pieces for the FAM Dispenser

5 piezas para el Difusor FAM



Schutzausrüstung anziehen.

FAM-Dispenser öffnen.

Portez des vêtements de protection.

Ouvrez le Diffuseur-FAM.

Usare un abbigliamento protettivo.

Aprire il Diffusore-FAM.

Wear protective equipment.

Open the FAM-Dispenser.

Ponerse el equipo de protección.

Abrir el Difusor FAM.




Pro Behandlung braucht es 130 ml Ameisensäure 70%.

Appliquez 130 ml d'acide formique 70% par traitement.

Travasare 130 ml di acido formico 70% per ogni trattamento.

Apply 130 ml formic acid 70% per treatment.

Se necesitan 130 ml de ácido fórmico 70% por tratamiento.

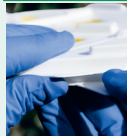

FAM-Dispenser schliessen. Waagrecht halten.

Fermez le Diffuseur-FAM. Maintenir horizontalement.

Chiudere il Diffusore-FAM. Tenerlo in posizione orizzontale.

Close the FAM-Dispenser. Keep it horizontal.

Cerrar el Difusor FAM. Mantenerlo en posición horizontal.



Die Öffnungen des FAM-Dispenser mittels drehbarer Scheibe einstellen.

Ajustez les ouvertures du Diffuseur-FAM, avec disque rotatif.

Le aperture del Diffusore-FAM possono essere regolate.

Adjust the openings of the FAM-Dispenser with the rotating disc.

Ajustar las aberturas del Difusor FAM mediante el disco giratorio.



Hohlraum geben. FAM-Dispenser mit Öffnungen nach unten über das Brutnest legen.

Laissez un vide espace. Installez le Diffuseur-FAM sur les cadres avec les ouvertures vers le bas au-dessus du couvain.

Lasciare un vano vuoto. Disporre il Diffusore-FAM con le aperture orientate verso il basso sopra i favi di covata.

Leave enough space. Place the FAM-Dispenser with the openings facing downwards over the brood chamber.

Dejar suficiente espacio. Colocar el Difusor FAM sobre el nido de cría con las aberturas hacia abajo.