

VARROX®-Verdampfer

Das Original zur Verdampfung von Oxalsäure-Dihydrat



Anwendungszeitpunkt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

- Schonend und gute Bienenverträglichkeit
- Hohe und langanhaltende Wirksamkeit
- Einfache Dosierung

Anwendung

- ✓ Im brutfreien Zustand, November – Dezember
- ✓ Ideal bei Temperaturen um 5 °C
- ✓ Mit VARROXAL, reines Oxalsäure-Dihydrat und ohne Zusatzstoffe. Verdampft ohne Rückstände.

Dosierung

- ✓ 1 Messlöffel entspricht genau 1 g
- ✓ Einräumige Beute 1 g
- ✓ 2 Zargen und Dadant 2 g



1. Einführen

VARROXAL ins Pfännchen einfüllen. Abmessung je nach Beutesystem. Einfache Dosierung dank dem Messlöffel.



2. Anschliessen

VARROX®-Verdampfer an einer Autobatterie 12 V anschliessen.



3. Anwenden

Flugloch gut abdichten und während 2 ½ Minuten VARROXAL verdampfen lassen.